



WITHINGS | BODY SCAN

DISCOVER OUR DEVICES

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CONNECTÉS | ENTDECKEN SIE UNSERE GESUNDHEITSGERÄTE



withings.com



AW_056_HERO_WB508_ALL_INT_G
V1.0 Sept-2022

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ | WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY
WELCOME TO THE COMMUNITY

Daily guided missions.
Trackable health improvements. Motivation is built in.
Soyez accompagné dans vos missions santé.
Suivez vos progrès. Restez motivé au quotidien.
Täglich begleitende Aufgaben.
Messbare Fortschritte der Gesundheit. Inklusive Motivation.



GET STARTED COMMENCER | ERSTE SCHRITTE



go.withings.com

1 Download the Withings app

Téléchargez l'application Withings
Laden Sie die Withings-App herunter



2 Create an account

Créez votre compte
Erstellen Sie ein Konto



3 Go to 'Devices' and follow installation instructions

Rendez-vous dans "Appareils" et procédez à l'installation
Gehen Sie zu „Geräte“ und folgen Sie bitte der Installationsanleitung




YOUR BODY SCAN VOTRE BODY SCAN | IHRE BODY SCAN



Electrodes
Électrodes
Elektroden



Digital Display
Écran numérique
Digitale Anzeigel

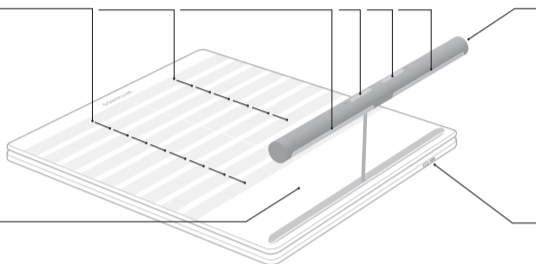

Handle
Poignée
Handgriff



Pairing button & USB-C
Bouton d'appairage & USB-C
Pairing-Taste & USB-C



USB-C Cable
Câble USB-C
USB-C-Kabel




Wall handle mount (optional)
Support mural pour poignée
Wandhalterung für Handgriff




Cable stopper
Bloqueur de câble
Kabelstopper

QUICK START DÉMARRAGE RAPIDE | KURZANLEITUNG

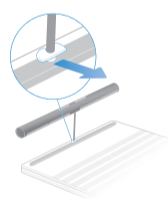

Remove the cable stopper but do not discard.


It is helpful when using the wall handle mount.
Enlevez le bloqueur de câble, mais ne le jetez pas. Vous en aurez besoin pour utiliser le support mural de la poignée.
Entfernen Sie den Kabelstopper, aber werfen Sie ihn nicht weg. Er ist hilfreich, wenn Sie die Wandhalterung verwenden.

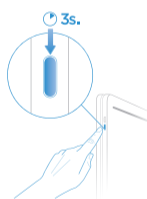

Press the button for 3 seconds to wake up the scale.

Note: you may need to charge device before use.
Appuyez le bouton pendant 3 secondes pour réveiller la balance. Note : vous aurez peut-être besoin de la charger avant utilisation.
Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Waage zu aktivieren. Hinweis: Möglicherweise muss das Gerät vor Gebrauch aufgeladen werden.

BEST PRACTICES BONNES PRATIQUES | EMPFOHLENE PRAKTIKEN

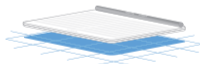

1. Place the scale on a hard, flat surface

Placez la balance sur une surface plane et dure.
Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche.




3. Weigh in with bare feet that are centered and covering the stripes (electrodes).

Pesez-vous les pieds nus et centrés, de manière à ce qu'ils couvrent les bandes (électrodes).
Wiegen Sie sich barfuß, wobei die Füße mittig positioniert sind und die Streifen (Elektroden) bedecken.



2. Grab and pull the handle. Step on the scale.

Saisissez la poignée et tirez-la. Montez sur la balance.
Nehmen Sie den Handgriff und ziehen Sie ihn heraus. Steigen Sie auf die Waage.

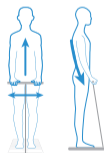


4. Stand up straight, arms relaxed and down as shown in the illustration.

Tenez-vous droit(e), les bras baissés et détendus, comme indiqué sur l'image.
Stehen Sie aufrecht, die Arme entspannt und nach unten gerichtet, wie in der Abbildung gezeigt.

HEALTH+ DAILY HEALTH IMPROVEMENT SYSTEM

DISPOSITIF QUOTIDIEN D'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ | SYSTEM ZUR TÄGLICHEN VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT

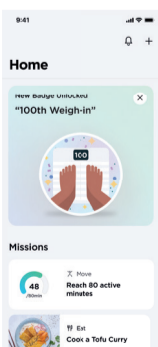


Get daily guided missions.

Laissez-vous guider par des missions quotidiennes.
Erhalten Sie täglich geführte Aufgaben.



Access cutting-edge biomarkers.

Accédez à des biomarqueurs de pointe.
Greifen Sie auf hochmoderne Biomarker zu.

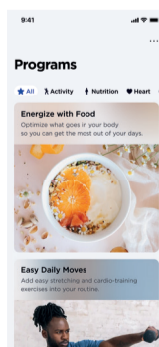

Dive into an exclusive content library.

Plongez dans une bibliothèque de contenus exclusifs.
Entdecken Sie eine Sammlung exklusiver Inhalte.

*Features are subject to change. Some features may not be available at launch in all regions or all languages.

*Les fonctionnalités peuvent être amenées à changer. Certaines pourraient être indisponibles dans certaines régions ou langues lors du lancement.

*Funktionsänderungen vorbehalten. Einige Funktionen sind zum Zeitpunkt der Markteinführung möglicherweise nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar.